

**AllPrime** *dental products*

Instruções de Uso

**ADESIVO UNIVERSAL**

# AllPrime - Adesivo Universal

## Adesivo Universal

### 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

ALLPRIME SELECT - ADESIVO UNIVERSAL é um agente, fotopolimerizável, responsável pela união entre a estrutura dental (esmalte e dentina) e demais materiais restauradores, visando a técnica de restauração adesiva, aplicável com a técnica autocondicionante, de condicionamento seletivo ou de Condicionamento total.

### 2. INDICAÇÕES :

- ALLPRIME SELECT - ADESIVO UNIVERSAL é indicado para:
- Restaurações diretas de todas as classes com compósitos;
- Ligação adesiva de restaurações indiretas (inlays, onlays, facetas, coroas e pinos intracanaís) em fibra de vidro, cerâmica condicionável ou não, compósitos e metais;
- Reparos adesivos em cerâmicas e compósitos;
- Selagem da dentina.

### 3. COMPOSIÇÃO:

Monômeros (Bis-GMA, GDMA, UDMA), BHT, Ethyl-4-Dimethyl Amino Benzoate, 2 - Hidroxietil Metacrilato, Promotores de adesividade (Tipo metacrilatos), Óxido 2,4,6-trimetilbenzoildifenil fosfina, Álcool Etílico, Fotoiniciadores e Agente de fluorescência.

### 4. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:

ALLPRIME SELECT - ADESIVO UNIVERSAL: 01 frasco contendo 5mL;  
01 Instrução de Uso impressa ou digital através de leitura de QR code no cartucho.

### 5. INSTRUÇÃO DE USO:

#### TÉCNICAS DE APLICAÇÃO

Autocondicionamento: aplique o ALLPRIME SELECT - ADESIVO UNIVERSAL diretamente no esmalte e na dentina

Condicionamento seletivo: condicione primeiro o esmalte. Em seguida, aplique o ALLPRIME SELECT - ADESIVO UNIVERSAL no esmalte e na dentina.

Condicionamento total: condicione primeiro o esmalte e a dentina. Em seguida, aplique o ALLPRIME SELECT - ADESIVO UNIVERSAL no esmalte e na dentina.

#### MODO DE USO:

##### • Restauração direta em esmalte e/ou dentina:

Preparar o elemento dentário.  
Realizar profilaxia com pedra pomes e água.  
Registrar cor dos dentes quando necessário.  
Administração de anestesia intraoral quando necessário.

##### • Preparação de cavidades:

Preparar a cavidade oral, de acordo com o princípio da técnica de restauração adesiva.  
Para o isolamento, recomenda-se a utilização de um dique de borracha.  
Proteger a polpa, aplicando uma pequena quantidade de cimentos de hidróxido de cálcio de secagem dura.  
Finalizar o esmalte com uma broca de diamante.  
Em caso de esmalte não cortado, condicione com gel de ácido fosfórico ou limpe com pedra pomes.  
Em seguida, enxague completamente com água e seque o esmalte cuidadosamente.

#### • **Condicionamento:**

Não é necessário um condicionamento ácido na técnica autocondicionante.

Para a técnica de condicionamento seletivo: condicione somente o esmalte.

Técnica de condicionamento total: condicione o esmalte e a dentina.

Aplique para b) e c) o gel de ácido fosfórico de acordo com as instruções de uso. A seguir, enxague bem e verifique se não ficaram resíduos. Seque a cavidade com ar isento de óleo.

Importante: não ressecar a dentina, proceda a secagem, preferencialmente, com papel absorvente.

#### • **Aplicação:**

Agite bem o frasco antes de utilizar.

Dispense uma gota de ALLPRIME SELECT - ADESIVO UNIVERSAL no recipiente de mistura e aplique na cavidade com o auxílio de um aplicador descartável.

Esfregue a superfície durante 20 segundos e seque cuidadosamente com ar isento de óleo durante 5 segundos.

Polimerize durante 10 segundos (fotopolimerização com halogéneo ou LED com uma intensidade da luz > 800mW/cm<sup>2</sup>). Uma intensidade de luz menor exige mais tempo de exposição.

Nota: evite o acúmulo de agentes adesivos. Isso pode prejudicar a precisão do ajuste.

Ligação adesiva de inlays, onlays, facetas e coroas:

Para a utilização do ALLPRIME SELECT - ADESIVO UNIVERSAL, é preciso garantir penetração de luz incidente suficiente por toda a restauração. De acordo com as especificações do fabricante.

O procedimento para preparação da restauração, depende do material e deve obedecer às instruções de utilização do fabricante.

A preparação de cavidades deve ser realizada de acordo com o passo "Preparação de cavidades" desta instrução de uso.

O condicionamento deve ser realizado de acordo com o passo "Condicionamento" desta instrução de uso.

A Aplicação deve ser realizada de acordo com o passo "Aplicação" desta instrução de uso.

A cimentação deve ser realizada de acordo com as instruções de uso do fabricante.

Ligação adesiva a outros materiais

Preparação da cerâmica:

De acordo com as instruções de uso do fabricante.

Preparação do metal e da amálgama

De acordo com as instruções de uso do fabricante. A seguir, limpe com um equipamento de limpeza a vapor ou acetona e seque com ar isento de óleo.

Preparação de cerâmicas não condicionáveis

Desgaste a superfície com uma broca de diamante ou um jato de areia com óxido de alumínio de 50µm. Limpe a superfície (p. ex., com ácido fosfórico), enxague e seque com ar isento de óleo.

Aplicação

Aplique ALLPRIME SELECT - ADESIVO UNIVERSAL na superfície com aplicador descartável.

Esfregue a superfície durante 20 segundos e seque cuidadosamente com ar isento de óleo durante 5 segundos. Polimerize durante 10 segundos (fotopolimerização com halogéneo ou LED com uma intensidade da luz > 800mW/cm<sup>2</sup>). Uma intensidade de luz menor exige mais tempo de exposição.

Nota: evite a acumulação de agentes adesivos. Isso pode prejudicar a precisão do ajuste.

## **6. DESINFECÇÃO E CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO:**

Não há condições especiais de manipulação, quando o produto é utilizado por um profissional de odontologia de acordo com as instruções de uso. Descartar o produto conforme legislação local vigente.

## **7. PRECAUÇÕES:**

PARA USO PROFISSIONAL

Os componentes de ALLPRIME SELECT - ADESIVO UNIVERSAL podem causar sensibilidade em pessoas com predisposição para a mesma.

Não armazenar junto a materiais que contenham eugenol ou óleo de cravo, os quais podem inibir a polimerização do ALLPRIME SELECT - ADESIVO UNIVERSAL.

Em caso de contato direto com a mucosa oral, enxaguar com água em abundância. Em caso de contato com os olhos, enxague bem com água. Procure ajuda médica para avaliação e tratamento subsequente.

Após dispensar/utilizar o produto, feche imediatamente a tampa do frasco e do recipiente de mistura. Não é recomendada a utilização do ALLPRIME SELECT - ADESIVO UNIVERSAL, no caso de higiene oral inadequada.

Não é recomendada a utilização do ALLPRIME SELECT - ADESIVO UNIVERSAL se for impossível manter a área de trabalho seca.

## **8. RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS:**

Não há advertências quando ALLPRIME SELECT - ADESIVO UNIVERSAL é utilizado por um profissional de Odontologia de acordo com as instruções de uso. Entretanto em pacientes que possuem histórico de alergia a qualquer um dos seus componentes, recomendamos não fazer uso, ou ainda, quando a técnica estipulada não puder ser aplicada.

## **9. CONTRAINDICAÇÕES E EFEITOS ADVERSOS:**

Não há contraindicação quando o ALLPRIME SELECT - ADESIVO UNIVERSAL é utilizado por um profissional de Odontologia de acordo com as instruções de uso. Entretanto em pacientes que possuem histórico de alergia a qualquer um dos seus componentes, recomendamos não fazer uso, ou ainda, quando a técnica estipulada não puder ser aplicada.

## **10. VALIDADE:**

Sob condições adequadas de armazenamento, ALLPRIME SELECT - ADESIVO UNIVERSAL tem uma validade de 36 meses, mesmo após aberto, desde que mantido em sua embalagem original, devidamente fechado e acondicionado de acordo com as instruções de armazenagem.

A data de validade, que consta nas embalagens, representa o prazo máximo para utilização do produto. Não usar após a data de validade.

Feche imediatamente o frasco após a utilização, para evitar volatilização ou polimerização do ALLPRIME SELECT - ADESIVO UNIVERSAL

## **11. ARMAZENAMENTO:**

Conservar ALLPRIME SELECT - ADESIVO UNIVERSAL entre 15°C e 30°C.

Caso o produto seja armazenado no refrigerador, deixe o produto chegar à temperatura ambiente (15°C – 30°C) antes do uso.

A exposição frequente do ALLPRIME SELECT - ADESIVO UNIVERSAL à temperatura superior a 30°C, pode reduzir a vida útil e/ou alterar as características físico-químicas do produto.

Não expor a luz solar direta ou outras fontes de calor.

Não armazenar junto a matérias que contenham eugenol ou óleo de cravo, os quais podem inibir a polimerização do ALLPRIME SELECT - ADESIVO UNIVERSAL.

Mantenha o frasco bem fechado imediatamente após o uso.

### **Fabricante e Detentor da Notificação:**

**Vigodent S/A Indústria e Comércio**

End.: Rua Pesqueira 26 – Bonsucesso – Rio de Janeiro – RJ – CEP 21041-150

CNPJ: 33.425.331-0001-22

Responsável Técnico:

Cátia Mara da Eira Hoehn

CRQ/RJ: 03212642 – 3ª Região

**Registro da ANVISA: 10068879066**

**Cód AllPrime: 9781588**

